

BEAUTY FORUM

N°75 | 05-06/2025

FOCUS

Beauté minimaliste

BUSINESS

Recrutement :
l'intérêt du job dating

DOSSIER

TECHNOLOGIES :
LES TENDANCES DE SOIN

EXPERTISE EN CABINE : ZOOM SUR 5 TRAITEMENTS DE POINTE

Fruits d'une expertise pointue, les traitements en cabine s'appuient sur des technologies variées qui leur confèrent toute leur efficacité. Exemples à l'appui, cette sélection de soins vous permettra d'évaluer tout leur potentiel.

> GENE0 X POUR UNE OXYGÉNATION NATURELLE DE LA PEAU

Les traitements innovants et personnalisés réalisés avec la plateforme de soins esthétiques Geneo X permettent d'obtenir une amélioration visible de la qualité de l'épiderme. Les cinq technologies de pointe dont est dotée Geneo X sont axées sur l'oxygénation naturelle, révélant l'éclat de l'intérieur pour une peau ferme, lisse, radieuse et d'apparence saine.

• Technologies

- **Tripollar radiofréquence** pour stimuler l'activité des fibroblastes et augmenter la synthèse de nouveau collagène.

- **ESA électrostimulation** pour remodeler, lifter et raffermir la peau.
- **Oxygeneo** : le principal composant de la technologie Oxygeneo contient les principes actifs pour une triple action : exfoliation – oxygénation – absorption.
- **Ultrasons** non focalisés de basse fréquence, qui augmentent la perméabilité de la couche cornée.
- **Massage** en complément de la procédure Oxygeneo pour faire ressortir l'éclat de la peau.

• Objectifs

- booster le processus naturel d'oxygénation de la peau,
- exfolier en profondeur,
- nourrir intensément les tissus cutanés,
- améliorer l'absorption des actifs des sérums,
- raffermir la peau,
- stimuler la microcirculation sanguine et décongestionner.

• Traitements

Geneo X permet de proposer neuf soins différents scindés en soins découverte (Detox, Balance), soins classiques (Hydrate, Protect, Retouch) et soins VIP (Glam, Revive, Illuminate, Energize).

• Les +

- neuf soins pour répondre à toutes les problématiques,
- des résultats dès la première séance,
- tous phototypes et types de peau.

Beauty Tech - Durées et tarifs conseillés :

Soin découverte – 40 min. – 99 €;

Soin classique – 60 min. – 129 €;

Soin VIP – 75 min. – 149 €.



> BELUXO® POUR PERDRE DU POIDS

En agissant sur le système hormonal, digestif et lymphatique, l'appareil de Luxopuncture® Beluxo® permet de réguler l'entière du système fonctionnel du corps afin d'assurer une perte de poids durable sans effet yoyo.

› Technologie

La Luxopuncture® est une technologie réflexe par rayonnement infrarouge qui s'inscrit dans la lignée des techniques énergétiques ancestrales. La stimulation des points réflexes avec l'infrarouge a pour objectif de rétablir l'équilibre fonctionnel de l'organisme. Lors des séances, le praticien stimule une trentaine de points réflexes avec le Beluxo®.

› Objectifs

- réguler l'appétit et retrouver le sentiment de satiété;
- supprimer les comportements compulsifs: fringales, grignotages, envies de sucré, de salé, ou de gras, etc. ;
- améliorer le sommeil et l'humeur;
- réguler le transit et diminuer la rétention d'eau;
- stabiliser le poids de forme avec des règles simples.

› Protocole

Après la phase d'accompagnement (bilan, remise du guide de rééquilibrage alimentaire et conseils nutrition, définition du nombre de séances et prise de mesures), la cure se compose de deux séances par semaine en phase d'attaque, puis d'une



séance hebdomadaire en phase de perte de poids et d'une séance par mois en phase de stabilisation.

› Contre-indications

Femmes enceintes, personnes épileptiques, personnes atteintes de maladies organiques graves.

› Les +

- possibilité de compléter avec les autres protocoles de l'appareil pour pallier les blocages,
- peut être couplé avec d'autres soins minceur,
- accompagnement personnalisé.

Luxomed - Durée et tarifs conseillés : 30 min. + temps accordé pour le suivi - Bilan : 60 € - 1 séance : 55 € - 5 séances : 250 € - 10 séances : 500 € (à adapter selon sa zone géographique et son offre de soin).

> ENDOSPHERES® ESSENZA, LES BIENFAITS DE LA MICROVIBRATION COMPRESSIVE®



Avec sa technologie avancée et intuitive, Endosphères® Essenza offre tous les avantages de la Microvibration Compressive® dans une version optimisée pour améliorer visiblement la qualité de la peau et le bien-être général du corps.

› Technologie

Les microvibrations par compression génèrent une action pulsée et rythmique sur les tissus grâce à la transmission de vibrations de basse fréquence (entre 29 et 355 Hz). La pièce à main abrite un cylindre doté de 55 sphères disposées en nid d'abeille qui tourne sur lui-même. Grâce au sens de rotation et à la pression exercée, la microcompression est transmise aux tissus. C'est la fréquence, mesurable à travers la variation de la vitesse du cylindre, qui génère cette microvibration.

› Objectifs

Le traitement corps permet de traiter tous les types de cellulite, la peau

d'orange, les vergetures, la graisse abdominale, les fessiers, les cuisses, les bras relâchés, les jambes lourdes. Il est également efficace en phase de post-grossesse, sur la relaxation musculaire et sur la détente et le bien-être.

› Traitement corps

Une fois le diagnostic réalisé afin d'identifier le niveau d'imperfection à traiter, le traitement corps est recommandé en cure de 12 séances à raison de deux soins par semaine, puis d'une ou deux séances mensuelles en entretien. Il se décompose en phases antalgique, séances 1, 2, 3, 4 - fonctionnelle, séances 5, 6, 7, 8 - localisée, séances 9, 10, 11, 12.

› Les +

- traitements personnalisés,
- tout type de peau,
- confort d'utilisation.

Endosphères® - Durée et tarif: NC.

> ELITYS POUR REMODELER LE CORPS

L'Elitys est un appareil de remodelage corps complet conçu pour remodeler la silhouette de manière globale grâce à des protocoles non invasifs, rapides et personnalisés aux résultats durables.

• Technologies

Radiofréquence, endomassage, vibro percussion, EMS, infrarouge, lipolaser, aspiration, ultrasons, électroporation et chromo-fréquence.

• Objectifs

- affiner, redessiner et remodeler la silhouette,
- éliminer l'aspect peau d'orange,
- améliorer la texture de la peau,
- raffermir et tonifier la peau,
- lisser les vergetures,
- travailler la cellulite aqueuse, adipeuse et fibreuse,
- réduire les amas graisseux localisés.

• Traitement

Tout commence par un diagnostic afin de comprendre les besoins du client,

de vérifier les contre-indications et d'analyser la silhouette et les zones à traiter. Cela permet de déterminer le protocole et le nombre de séances à mettre en place. La cure comprend trois phases de soin (drainage des déchets et détoxification des tissus; soin intense spécifique à l'imperfection; maintien des résultats) dont le nombre de séances est déterminé selon l'objectif.

• Les +

- traitement de tous types de cellulite et des vergetures,
- protocole personnalisé pour un travail en profondeur,
- plateforme complète, ergonomique et différenciante.

HTA - Durée et tarif conseillé : 10 séances de 30 à 40 min. à raison d'1 à 2 séances/semaine, puis 1 séance/mois en entretien – 65 à 99€ selon le nombre de séances.



> CONTOUR COLLAGEN BOOST®, L'ALLIANCE DU MASSAGE ANCESTRAL ET DE LA TECHNOLOGIE



Le soin Contour Collagen Boost® est l'alliance unique de la technologie de radio-multifréquence Contour Collagen Boost® et d'un modelage anti-âge inédit inspiré du kobido créé par la facialiste

Nina Cambier. Lissée et repulpée, la peau retrouve sa fermeté originelle, les rides et ridules sont éliminées et les contours du visage redéfinis.

• Technologie

Le Contour Collagen Boost® combine trois pièces à main à des ondes multifréquences qui pénètrent en profondeur dans les différentes couches de la peau afin d'atteindre en moins de deux minutes une température en surface de 42°C, entraînant une cascade de réponses physiologiques positives.

• Objectifs

- régénération cellulaire intensive,
- amélioration de la microcirculation,
- effet liftant,
- relaxation,
- personnalisation (contour des yeux, de la bouche, ovale du visage, front marqué, etc.).

• Protocole

Après avoir déterminé la zone de traitement, les objectifs du client et l'âge de sa peau, le calendrier des séances de radiofré-

quence est établi. Le soin commence par une prise de contact pour préparer le corps et l'esprit, suivi d'un démaquillage délicat. Grâce à une gestuelle précise, le praticien procède au modelage alternant rythmes et techniques pendant 60 minutes. Il procède ensuite à l'application d'ondes radio-multifréquence de la Contour Collagen Boost® pour un effet tenseur et durable. Et conclut le soin par l'application d'un masque hydratant et un massage crânien profond.

• Contre-indications

Présence d'un pacemaker ou d'un implant métallique, grossesse, lésion cancéreuse, cicatrices chéloïdes, couperose, dermatose, grains de beauté (à contourner).

• Les +

- un soin signature original associant dernière technologie de radio-multifréquence et savoir-faire ancestral du massage facial japonais.

Contour Paris – Durée et tarif conseillé : 1h40 - 185 €.